

DONJOY[®]

DonJoy ActyLight[®]

SOPORTE PARA EL TOBILLO
DE USO CONTINUO



enovis[™]



DonJoy ActyLight®


Soporte para el tobillo de uso continuo

La comodidad y facilidad de uso del soporte para el tobillo DonJoy ActyLight® garantiza que los pacientes lo olvidarán por completo. Su diseño y su sistema de cordones bloqueables brindan un ajuste rápido y seguro que se complementa con un par de refuerzos anatómicos extraíbles. Su versatilidad permite su utilización tanto en casos agudos como crónicos, lo que significa que el ActyLight puede brindar apoyo a los pacientes durante todo el tratamiento.

Uso previsto/Indicaciones:

DonJoy ActyLight está diseñado para dar soporte y estabilización al tobillo.

- Esguinces leves a moderados del ligamento lateral
- Lesiones sindesmóticas aisladas (Grado 1)
- Manejo inicial de inestabilidades crónicas de tobillo
- Recuperación deportiva, prevención de nuevas lesiones.
- Inestabilidad del ligamento
- Prevención de supinación

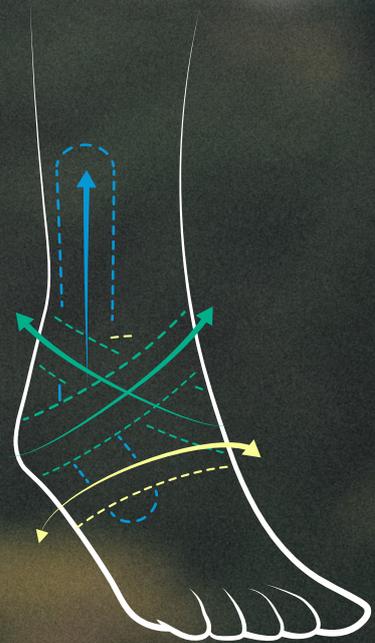

Cómo funciona

El diseño paso a paso de ActyLight proporciona retroalimentación propioceptiva y funciona con elementos semirrígidos para estabilizar el tobillo y restringir el rango de movimiento excesivo.

- **Los soportes semirrígidos bilaterales** proporcionan estabilidad mecánica para evitar la inversión/eversión del tobillo
- **Las cinchas cruzadas gemelas** brindan mayor control de inversión/eversión del tobillo
- **Malla en el antepié** fabricada en material transpirable para proporcionar soporte propioceptivo y de compresión para el pie

Características y beneficios



El diseño paso a paso hace que ponerse y quitarse la tobillera sea rápido y fácil



El mecanismo seguro de bloqueo de cordones permite un ajuste preciso, ayuda a mantener un ajuste constante y permite una liberación rápida



Los tejidos ligeros y transpirables ayudan a que el pie se mantenga fresco y seco




Las cinchas gemelas elásticas brindan control de inversión/eversión



Los refuerzos bilaterales con contorno anatómico brindan estabilidad adicional y protección, y se pueden repositionar para adaptarse a los maléolos



Se ajusta cómodamente en unas zapatillas deportivas, lo que permite a los pacientes mantenerse activos

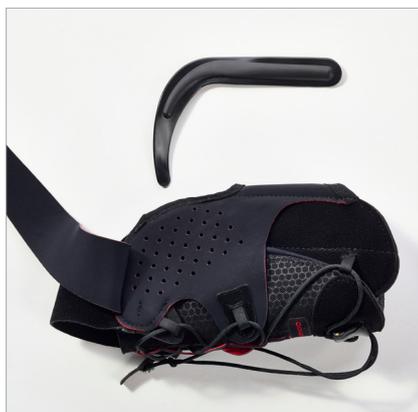

Su diseño modular permite adaptar fácilmente el soporte para uso agudo o crónico al quitar las varillas





DONJOY®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE TALÓN	LONGITUD DEL PIE	TALLA
82-0054-1	≤ 27 cm	32 - 36	XS
82-0054-2	27 - 30 cm	36 - 39	S
82-0054-3	30 - 34 cm	39 - 43	M
82-0054-4	≥ 34 cm	43 - 47	L

enovisTM

Creating Better Together™

enovis.es

ENOVIS IBÉRICA, Carretera de Esplugues, 225 2ªB, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
T: +34 93 480 32 02
E: ventas@enovis.com

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.

MKT-000-00159475-EN - Rev A

Copyright © 2023 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation