



DonJoy Crutches

Optimal anvendelse

Albuestokke/krykker til brug efter tilskadekomst eller operation. Fås til både børn og voksne. **Tilpasning af højde:** Fjern klik-mekanismen fra rørene. Brug begge tommelfingre og juster derefter det indvendige rør, så det får den ønskede højde og lås derefter igen med klik-mekanismen.

Før du tager krykken i brug, skal du kontrollere at metalsplitten i klik-mekanismen går gennem begge rør og stikker ud fra det udvendige rør. Krykkerne har to justeringshuller på det udvendige rør og fem huller på det indvendige rør, i alt ti justeringspositioner. Krykken kan justeres i trin af to cm.

Fordele og egenskaber

Vægt & mål (krykker til voksne)

- Krykkernes maksimale bæreevne: 150 kg
- Krykkens længde (håndtag til gulv): 74 – 96 cm
- Håndtagets vinkel: 28°

Sammensætning

Anodiserede aluminiumsrør og håndtag i polypropylen.

Bestillingsinformation

DonJoy Crutches		
Varenummer	Beskrivelse	Antal
24-2000-U-36060	Krykker til voksne	6 par
11-2510-P-360710	Krykker til børn	1 par